



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.99.88.002.E.001352.05.23 ОТ 24.05.2023 г.

ПРОДУКЦИЯ

средство дезинфицирующее "Алмадез-стерил". Область применения: форма выпуска, условия хранения, способ применения в соответствии с инструкцией применению средства от 22.03.2023 г. № 15/23. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.20.14-015-62852506-2018.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Базовая дезинфекция", 105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 39, офис 415 (адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 111024, г. Москва, Андроновское ш., вл. 12а; 141102, Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 105), Российская Федерация.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Базовая дезинфекция", 105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 39, офис 415, Российская Федерация. ОГРН: 1097746574144

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.E.001681.04.19 от 30.04.2019 г.; экспертных заключений: ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора (аттестат аккредитации № RA.RU.21EB03) от 22.03.2023 г. № 61/23, от 11.03.2019 г. № 18/19; этикетки; рецептуры; ТУ; инструкции по применению средства от 22.03.2023 г. № 15/23.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Заместитель руководителя

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



И.В. Брагина

(Ф. И. О.)

№ 0454685



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.21087/23**

Общество с ограниченной ответственностью «Базовая дезинфекция» (ООО «Базовая дезинфекция»)
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, дата регистрации 28.09.2009 г., ОГРН: 1097746574144, ИНН 7722696238

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

место нахождения: Россия, 105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 39 офис 415,
телефон: +7-495-507-79-84, email: info@badez.ru

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Зотова Дмитрия Николаевича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что продукция Дезинфицирующее средство «АЛМАДЕЗ-стерил»

Код ОКПД 2 20.20.14, Код ТН ВЭД ЕАЭС 3808 94 800 0

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 20.20.14-015-62852506-2018

Серийный выпуск

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН))

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Базовая дезинфекция» (ООО «Базовая дезинфекция»), место нахождения: Россия, 105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 39 офис 415.

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 111024, г. Москва, Андроновское ш., вл. 12а; Россия, 141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 105.

наименование изготовителя, страны и т.п.)

Соответствует требованиям ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» п. 1.2, п. 1.3; Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97пп. 1.1–1.7, 2.1–2.9, 5.1; ГОСТ Р 58151.1-2018 «Средства дезинфицирующие. Общие технические требования.»; Инструкция № 15/23 от 22.03.2023 г. по применению дезинфицирующего средства «АЛМАДЕЗ-стерил».

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: Протокола испытаний № 5489, выданного 24.04.2023 г.

испытательной лабораторией «Испытательный лабораторный Центр Федерального Бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора РФ» Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.E.001352.05.23 от 24.05.2023 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Срок действия декларации о соответствии с 07.06.2023 г. по 06.06.2028 г.



(подпись)

Зотов Дмитрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

3.22. Обработку объектов санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов производят способом опрыскивания или пропаривания в соответствии с режимами, указанными в таблице 4.

При проведении дезинфекционной дезинфекции в условиях отсутствия местных организаций санитарной на объектах транспорта допустимо использование растворов обихода, указанных в табл. 2.

После дезинфекции автотранспорта для перевозки пищевых продуктов, обработанные поверхности промывают водой и вытирают насухо.

Обработку поверхностей и объектов на общественном транспорте и метрополитене, кабин и отсеков вагонов судов гражданской авиации производят по режимам обработки санитарного транспорта, указанным в таблице 4, с использованием способом пропаривания матовой тканью, сменной раствором средства по расходу 100 мл/м² или путем опрыскивания по расходу 150 мл/м² до полного смачивания поверхностей.

3.23. Для дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирования мусороборочного оборудования, мусоропроводов, мусороулавливающих баков и мусороборочных, мусоропроводов, обрабатываемых сжатым воздухом баков автономных туалетов, не имеющих отвода в канализацию, а также поверхностей в кабинетах автономных туалетов и биотуалетов применяют режимы, указанные в таблице 2. Мусороборочное оборудование, мусороулавливающие баки обрабатывают в соответствии с СанПиН 2.1.1.132-03 «Гигиенические требования к размещению и оборудованию туалетов общественного пользования» способом опрыскивания при нормальном расходе раствора средства 300 мл/м².

3.24. Для обеззараживания поверхностей и объектов в помещениях и зданиях патологоанатомических служб, учреждений судебно-медицинской экспертизы, в лабораториях, кабинетах, помещениях бора и биоматериалов, а также трюмовых отсеков, других хранилищ и сооружений организаций, оказывающих ритуальные и похоронные услуги, объекты моют без использования по режимам таблицы 4.

Автотранспорт обрабатывают по режимам обработки санитарного транспорта (таблица 3).

Выделения и другие органические загрязнения обеззараживают и утилизируют в соответствии с режимами п. 3.26 настоящей Инструкции.

3.25. Генеральные уборки в лечебно-профилактических организациях и детокс учреждений производят по режимам, представленным в табл. 7, способом пропаривания и опрыскивания в течение трехчасового только способом пропаривания.

Генеральная уборка функциональных помещений, палат и кабинетов проводится по графику не реже одного раза в месяц, операционных блоков, перекладочных, розничных залов, процедурных, манипуляционных, стерилизационных — один раз в неделю.

Вне графика генеральную уборку производят в случае получения неудовлетворительных результатов микробной обсемененности внешней среды по эпидемиологическим показателям.

Обеззараживание объектов способом пропаривания допускается проводить в присутствии персонала без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз.

Допустимая норма расхода средства «АлмаДез-стерил» составляет 50-100 мл/м². Смыкание рабочего раствора средства с обрабатываемыми поверхностями после дезинфекции не требуется.

Обеззараживание объектов методом опрыскивания следует проводить в отсутствие персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания: универсальные респираторы марки РУ-60 М или РПГ-67 с патроном марки В, глаз герметичные очки, кожаный костюм, резиновые перчатки, спецобувь.

Обработку объектов способом опрыскивания производят с помощью подогретой, автоклава, аэрозольного генератора и других аппаратов или оборудования, разрешенных для этих целей, добиваясь равномерного и обильного смачивания.

Допустимая норма расхода средства «АлмаДез-стерил» составляет 150 мл/м². Смыкание рабочего раствора средства с обрабатываемыми поверхностями после дезинфекции не требуется. По истечении дезинфекционной выдержки остаток рабочего раствора при необходимости утилизируют с поверхностей сафетом.

3.26. Дезинфекцию (обеззараживание) микробных, пищевых и прочих отходов лечебно-профилактических учреждений и организаций, в том числе информационных отделений, кожно-

венопроктологических, фтизиатрических и микстологических больных, объектов санитарного транспорта, а также лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-4 группами патогенности, и других учреждений производят с учетом требований действующих нормативных документов в соответствии с режимами, рекомендованными в табл. 15. Обеззараживание средством «АлмаДез-стерил» проводят также смеси и-под отходов классов А, Б и В.

3.26.1. Использование переработанный материал, салфетки, катане тампоны, белье однократного применения, одежда персонала, маски и пр. погружают в отстойную смесь с раствором средства. По окончании дезинфекции отходы утилизируют.

3.26.2. Дезинфекцию изделий медицинского назначения однократного применения (отходы класса В) осуществляют в смеси, замораживая крышками. При проведении дезинфекции изделия полностью погружают в раствор средства. Различные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сдвинув или в раствор несъемные рабочие детали для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) изделия и полости должны быть замочены (без воздушных пробов) раствором. Толщина слоя раствора над изделием должна быть не менее 1 см. После окончания дезинфекции изделия погружают по смеси с раствором, укупоривая и транспортируют в соответствии с процедурой, утвержденной в организации.

Обеззараживание изделий однократного применения производят в соответствии с действующими нормативными документами.

3.26.3. Контейнеры для сбора и перемещения медицинских отходов различных классов обрабатывают способом пропаривания или опрыскивания.

3.26.4. Биологические жидкости и выделения (кровь, фекалии, фекально-мочевая смесь, слюна, слезы, моча, мочевые массы, мочевые массы, сперматозоидная жидкость, ватеропродолжения материала, денатуративный материал, патологоанатомические отходы, органические и неорганические отходы (органы, ткани и т.д.), остатки пищи) обеззараживают раствором средства по режимам, представленным в таблице 16.

3.26.5. Остатки пищи (в информационных и биологических стационарах, а также при неидентифицированной эпидемиологической ситуации) смывают с рабочих поверхностей в соответствии с 1.1, выдерживают в течение времени экспозиции.

3.26.6. Жидкие биологические отходы (выделения) обеззараживают по мере необходимости, в соответствии с учетом требований действующих нормативных документов. Жидкие отходы, содержащие воду (выделения эсхерихиозные, моча, слезы, мочевые массы, мочевые массы (моча, фекалии и пр.) смешивают с рабочим раствором необходимой для дезинфекции концентрации. Дезинфекционный раствор замачивают непосредственно в смеси или на поверхность, где находится биологический материал. Давая полученная смесь выдерживается согласно используемому режиму обеззараживания. Во время дезинфекции в смеси, последние должны быть закрыты крышкой. Все работы персоналу проводить в резиновых перчатках, соблюдая противоэпидемиологические правила.

После окончания дезинфекционной выдержки смесь обеззараживают кипятком (выделения) и после окончания дезинфекционной выдержки утилизируют. При отсутствии других возможностей утилизируют смесь обеззараженной водой (выделения) и рабочие растворы средства моют водой с мылом.

3.26.7. В соответствии с действующими нормативными документами запрещается для использования дисперсионный раствор и препараты крови утилизировать путем автоклавирования. Однако кровь с сгустком, дисперсионный раствор и препараты крови не заражены, но с истекшим сроком годности допускается дезинфицировать путем смешивания с рабочим раствором средства в соответствии с 1 частью крови на 2 части раствора по режимам, указанным в таблице 3. Смесь выдерживают и утилизируют с учетом требований действующих нормативных документов.

3.26.8. Посуду и-под выделений биологическую, лабораторную посуду или поверхность, на которой проводили дезинфекцию и сбор обеззараженного биологического материала, обрабатывают по режимам, указанным в Таблице 3. Застывшую и-под выделений биологическую,

лабораторную посуду споласкивают под проточной водой, поверхности пропаривают чистой салфеткой, сачетной водой.

3.26.9. Ватные, ватные БДЖ, при повреждении индивидуальной упаковки и с истекшим сроком годности обеззараживают и утилизируют согласно действующим нормативным документам.

3.27. Режимы дезинфекции растворов средства «АлмаДез-стерил» при особо опасных инфекциях (бактериальной этиологии (очаг, холера, тулярия) приведены в табл.11, объектов, контактировавших с ними (объекты этиологии) — в табл.13.

3.28. Для использования в дежурных, дежурных, дежурных используют 0,5% раствор средства. Объем жидкого раствора средства заливается из раствора корпуса или мата и утилизируют по эксплуатации дежурных или дежурных. Смена рабочего раствора зависит от интенсивности использования корпуса. В среднем смена раствора дежурных происходит 1 раз в 3 часа.

3.29. Обработка помещений по площади поверхностей проводится с помощью пропаривания рабочим раствором салфеток, помещенных в дезинфекционную систему «АлмаДез» по режимам пропаривания.

3.30. Рабочие растворы средства можно применять для обработки любых объектов информации, если их внешний вид не меняется. При первых признаках изменения внешнего вида (помутнение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить.

Таблица 2. Режимы дезинфекции различных объектов раствором средства «АлмаДез-стерил» при вирусных инфекциях (в том числе полиомиелита, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, гриппа А (H1N1), отечного гриппа (H5N1), денге, кори, пр. инфекций, нейтробактериальных инфекций)

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора, % (по препарату)	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, оборудования, санитарный транспорт, транспорт для перевозки пищевых продуктов	0,5 0,1 0,2 0,5	60 30 15 5	Протирание или опрыскивание
Поверхности матов, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, покрытия из искусственных и натуральной кожи, матов, мебели	0,5 0,1 0,2 0,5	60 30 15 5	Протирание, обработка с помощью щетки
Санитарно-техническое оборудование	0,2 0,1 0,2 0,5	60 30 15 5	Духотное протирание или опрыскивание
Посуда, в том числе однократная, без остатков пищи	0,1 0,2 0,5	30 15 5	Погружение
Посуда, в том числе однократная, с остатками пищи	0,2 0,3 0,5	60 30 15	Погружение
Посуда лабораторная и аптечная (в том числе однократного использования)*	0,2 0,5 0,5	60 15 5	Погружение
Предметы для мытья посуды (щетки, сачки)	0,2 0,3 0,5	60 30 15	Погружение

Белье, загрязненное выделениями	0,2 0,3 0,5	90 60 30	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями	0,2 0,3 0,5	90 60 30	Замачивание
Уборочный инвентарь, материал для уборки помещений	0,2 0,3 0,5	90 60 30	Погружение (замачивание), протирание
Уборочный инвентарь (сачки, щетки, ветошь) для уборки санитарно-технического оборудования	0,2 0,3 0,5	90 60 30	Погружение (замачивание)
Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены	0,1 0,2 0,5	90 60 30	Погружение, протирание или опрыскивание
Предметы ухода за больными из металла, резины, пластика, стекла, не имеющие замковых, шпательной крошки и др.	0,2 0,3 0,5	90 60 30	Погружение или протирание
Кухни, напольные столы, предметы неинфекционных отделений, приспособления нарочно-дательной аппаратуры, анестезиологического оборудования	0,1 0,2 0,5	60 30 15	Протирание, погружение
Мусороборочное, мусороулавливающее, мусоропроводное оборудование, скармливающие накопительные баки автономных туалетов	0,2 0,3 0,5	90 60 30	Опрыскивание

Примечание: * - при дезинфекции крови, сыворотки крови и др. дезинфекцию производят по режимам, рекомендованным при работе с кровью.

Таблица 3. Режимы дезинфекции различных объектов раствором средства «АлмаДез-стерил» при туберкулезе (гепатитом на *Mycobacterium terrae*)

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора, % (по препарату)	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт, транспорт для перевозки пищевых продуктов	0,7 1,0 2,0 3,0	90 60 30 10	Протирание или опрыскивание
Поверхности матов, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, покрытия из искусственных и натуральной кожи, матов, мебели	0,7 1,0 2,0 3,0	90 60 30 10	Протирание, обработка с помощью щетки
Санитарно-техническое оборудование	0,2 0,3 0,5	90 60 30	Духотное протирание или опрыскивание с интервалом 15 мин

Уборочный инвентарь, материал	0,5 1,0 1,5	90 60 30	Замачивание
Плоские медицинские назначения по различным материалам, инструментам паракристаллическим, сапфировым, кварцевым, керамическим и полимерным, каптовым и пр. - биологические	0,5 1,0 1,5	60 30 15	Погружение
- замковые	1,0 1,5 2,0	60 30 15	Погружение
Контейнеры для сбора и утилизации медицинских отходов, емкости и-под выделений	1,0 1,0 1,0	60 30 15	Протирание или опрыскивание

Таблица 5. Режимы дезинфекции различных объектов раствором средства «АлмаДез-стерил» при туберкулезе (гепатитом на *Mycobacterium terrae*)

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора, % (по препарату)	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов	0,2 0,5 1,0	60 30 15	Протирание или опрыскивание
Кухни и оборудование в них, приспособления нарочно-дательной аппаратуры, анестезиологического оборудования	0,2 0,5 1,0	60 30 15	Протирание или опрыскивание
Санитарно-техническое оборудование	0,2 0,3 0,5	90 60 30	Духотное протирание или опрыскивание с интервалом 15 мин
Посуда, в том числе однократная, без остатков пищи	0,2 0,3 0,5	60 30 15	Погружение
Посуда, в том числе однократная, с остатками пищи	0,2 0,3 0,5	90 60 30	Погружение
Посуда аптечная, лабораторная (в том числе однократного использования), предметы для мытья посуды	0,2 0,5 0,5	90 60 15	Погружение
Предметы для мытья посуды	0,5 1,0 1,5	60 30 15	Погружение
Белье, загрязненное выделениями	0,2 0,3 0,5	60 30 15	Замачивание

Посуда, в том числе однократная, без остатков пищи	0,7 1,0 2,0 3,0	90 60 30 10	Погружение
Посуда, в том числе однократная, с остатками пищи	0,2 0,3 0,5	90 60 30	Погружение
Посуда лабораторная (в том числе однократного использования), предметы для мытья посуды	0,2 0,5 0,5	90 60 15	Погружение
Предметы для мытья посуды (щетки, сачки)	0,2 0,3 0,5	90 60 15	Погружение
Белье, загрязненное выделениями	0,2 0,3 0,5	90 60 30	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями	0,2 0,3 0,5	90 60 30	Замачивание
Уборочный инвентарь, материал	0,2 0,3 0,5	90 60 30	Замачивание
Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены	0,1 0,2 0,5	90 60 30	Погружение, протирание или опрыскивание
Предметы ухода за больными из металла, резины, пластика, стекла	0,2 0,3 0,5	90 60 30	Погружение, протирание или опрыскивание
Кухни, напольные столы, предметы неинфекционных отделений, приспособления нарочно-дательной аппаратуры, анестезиологического оборудования	0,1 0,2 0,5	60 30 15	Протирание, погружение
Нарочно-дательная аппаратура, анестезиологического оборудования	0,7 1,0 2,0 3,0	90 60 30 10	Погружение, протирание или опрыскивание
Пакетированный биоматериал, посуда и-под выделений	0,2 0,3 0,5	90 60 30	Погружение
Система кондиционирования и кондиционирование	1,0 1,0 1,0	40 40 40	Протирание, опрыскивание, аэрозольное

3.26.7. В соответствии с действующими нормативными документами запрещается для использования дисперсионный раствор и препараты крови утилизировать путем автоклавирования. Однако кровь с сгустком, дисперсионный раствор и препараты крови не заражены, но с истекшим сроком годности допускается дезинфицировать путем смешивания с рабочим раствором средства в соответствии с 1 частью крови на 2 части раствора по режимам, указанным в таблице 3. Смесь выдерживают и утилизируют с учетом требований действующих нормативных документов.

3.26.8. Посуду и-под выделений биологическую, лабораторную посуду или поверхность, на которой проводили дезинфекцию и сбор обеззараженного биологического материала, обрабатывают по режимам, указанным в Таблице 3. Застывшую и-под выделений биологическую,

лабораторную посуду споласкивают под проточной водой, поверхности пропаривают чистой салфеткой, сачетной водой.

3.26.9. Ватные, ватные БДЖ, при повреждении индивидуальной упаковки и с истекшим сроком годности обеззараживают и утилизируют согласно действующим нормативным документам.

3.27. Режимы дезинфекции растворов средства «АлмаДез-стерил» при особо опасных инфекциях (бактериальной этиологии (очаг, холера, тулярия) приведены в табл.11, объектов, контактировавших с ними (объекты этиологии) — в табл.13.

3.28. Для использования в дежурных, дежурных, дежурных используют 0,5% раствор средства. Объем жидкого раствора средства заливается из раствора корпуса или мата и утилизируют по эксплуатации дежурных или дежурных. Смена рабочего раствора зависит от интенсивности использования корпуса. В среднем смена раствора дежурных происходит 1 раз в 3 часа.

3.29. Обработка помещений по площади поверхностей проводится с помощью пропаривания рабочим раствором салфеток, помещенных в дезинфекционную систему «АлмаДез» по режимам пропаривания.

3.30. Рабочие растворы средства можно применять для обработки любых объектов информации, если их внешний вид не меняется. При первых признаках изменения внешнего вида (помутнение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить.

Таблица 2. Режимы дезинфекции различных объектов раствором средства «АлмаДез-стерил» при вирусных инфекциях (в том числе полиомиелита, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, гриппа А (H1N1), отечного гриппа (H5N1), денге, кори, пр. инфекций, нейтробактериальных инфекций)

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора, % (по препарату)	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт, транспорт для перевозки пищевых продуктов	0,5 0,1 0,2 0,5	60 30 15 5	Протирание или опрыскивание
Поверхности матов, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, покрытия из искусственных и натуральной кожи, матов, мебели	0,5 0,1 0,2 0,5	60 30 15 5	Протирание, обработка с помощью щетки
Санитарно-техническое оборудование	0,2 0,1 0,2 0,5	60 30 15 5	Духотное протирание или опрыскивание
Посуда, в том числе однократная, без остатков пищи	0,1 0,2 0,5	30 15 5	Погружение
Посуда, в том числе однократная, с остатками пищи	0,2 0,3 0,5	60 30 15	Погружение
Посуда лабораторная и аптечная (в том числе однократного использования)*	0,2 0,5 0,5	60 15 5	Погружение
Предметы для мытья посуды (щетки, сачки)	0,2 0,3 0,5	60 30 15	Погружение

3.26.7. В соответствии с действующими нормативными документами запрещается для использования дисперсионный раствор и препараты крови утилизировать путем автоклавирования. Однако кровь с сгустком, дисперсионный раствор и препараты крови не заражены, но с истекшим сроком годности допускается дезинфицировать путем смешивания с рабочим раствором средства в соответствии с 1 частью крови на 2 части раствора по режимам, указанным в таблице 3. Смесь выдерживают и утилизируют с учетом требований действующих нормативных документов.

3.26.8. Посуду и-под выделений биологическую, лабораторную посуду или поверхность, на которой проводили дезинфекцию и сбор обеззараженного биологического материала, обрабатывают по режимам, указанным в Таблице 3. Застывшую и-под выделений биологическую,

лабораторную посуду споласкивают под проточной водой, поверхности пропаривают чистой салфеткой, сачетной водой.

3.26.9. Ватные, ватные БДЖ, при повреждении индивидуальной упаковки и с истекшим сроком годности обеззараживают и утилизируют согласно действующим нормативным документам.

3.27. Режимы дезинфекции растворов средства «АлмаДез-стерил» при особо опасных инфекциях (бактериальной этиологии (очаг, холера, тулярия) приведены в табл.11, объектов, контактировавших с ними (объекты этиологии) — в табл.13.

3.28. Для использования в дежурных, дежурных, дежурных используют 0,5% раствор средства. Объем жидкого раствора средства заливается из раствора корпуса или мата и утилизируют по эксплуатации дежурных или дежурных. Смена рабочего раствора зависит от интенсивности использования корпуса. В среднем смена раствора дежурных происходит 1 раз в 3 часа.

3.29. Обработка помещений по площади поверхностей проводится с помощью пропаривания рабочим раствором салфеток, помещенных в дезинфекционную систему «АлмаДез» по режимам пропаривания.

3.30. Рабочие растворы средства можно применять для обработки любых объектов информации, если их внешний вид не меняется. При первых признаках изменения внешнего вида (помутнение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить.

Таблица 2. Режимы дезинфекции различных объектов раствором средства «АлмаДез-стерил» при вирусных инфекциях (в том числе полиомиелита, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, гриппа А (H1N1), отечного гриппа (H5N1), денге, кори, пр. инфекций, нейтробактериальных инфекций)

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора, % (по препарату)	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт, транспорт для перевозки пищевых продуктов	0,5 0,1 0,2 0,5	60 30 15 5	Протирание или опрыскивание
Поверхности матов, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, покрытия из искусственных и натуральной кожи, матов, мебели	0,5 0,1 0,2 0,5	60 30 15 5	Протирание, обработка с помощью щетки
Санитарно-техническое оборудование	0,2 0,1 0,2 0,5	60 30 15 5	Духотное протирание или опрыскивание
Посуда, в том числе однократная, без остатков пищи	0,1 0,2 0,5	30 15 5	Погружение
Посуда, в том числе однократная, с остатками пищи	0,2 0,3 0,5	60 30 15	Погружение
Посуда лабораторная и аптечная (в том числе однократного использования)*	0,2 0,5 0,5	60 15 5	Погружение
Предметы для мытья посуды (щетки, сачки)	0,2 0,3 0,5	60 30 15	Погружение

Резиновые и полипропиленовые ковровые, дерматологические	0,5 1,0 1,5	90 60 30	Погружение или протирание
Предметы ухода за больными из металла, резины, пластика, стекла	0,5 1,0 1,0	60 30 15	Погружение или протирание
Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены из различных материалов	0,5 0,7 1,0	60 30 15	Погружение или протирание

Таблица 7. Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральной уборки раствором средства «АлмаДез-стерил» в лечебно-профилактических и детских учреждениях

Профиль учреждения	Концентрация рабочего раствора по препарату, %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Детские учреждения	0,1 0,2 0,5	60 30 15	Протирание
Хирургические, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения, операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения, различные залы процедурных кабинетов	0,3 0,5 0,7 1,0	90 60 30 15	Протирание, опрыскивание
Палатные отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ любого профиля (прим. дезинфекция)	0,05 0,1 0,2	60 30 15	Протирание, опрыскивание
Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения, пенициллиновые учреждения	0,7 1,0 2,0 3,0	90 60 30 10	Протирание, опрыскивание
Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения	0,4 0,5 1,0	60 30 15	Протирание, опрыскивание
Инфекционные лечебно-профилактические учреждения	По режиму соответствующей инфекции		
Учреждения социального обслуживания, коммунальные объекты	0,05 0,1 0,3	60 30 15	Протирание, опрыскивание

